

CLEANLIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technický list **AIR**



www.cleanlife.cz

Flexibilní zástěna Air - rozměry

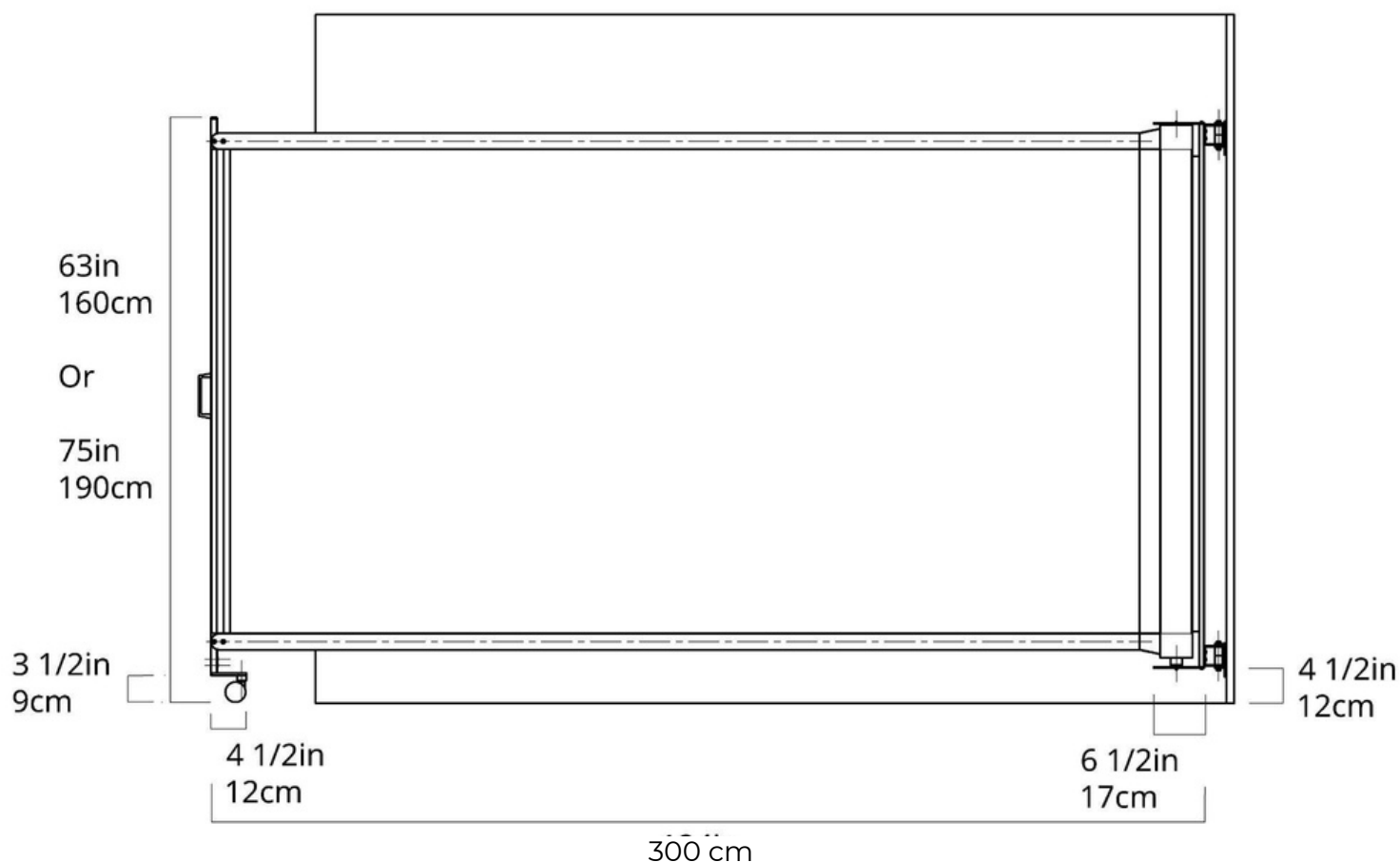

Délka ve složeném stavu	Délka při úplném otevření	Hloubka	Výška
17 cm	300 cm	31 cm	160/190 cm


Rozměry balení – 1 krabice na produkt

Kód zboží: 9402.90.0000

Popis: Ochranná přepážka sestávající z ocelového těla, vnitřního panelu z polyesterové fólie, plastových koleček, ocelové základové desky a ocelových kolíků.

Hlavní Box - Air 160cm vysoký (1)	165 x 26 x 26 cm 5'5" x 11" x 11"	16.5 Kg 36.5lb
Hlavní Box - Air 190cm vysoký (1)	199 x 26 x 26 cm 6'5" x 11" x 11"	18.5 Kg 41 lb

Flexibilní zástěna Air - Podrobnosti o produktu

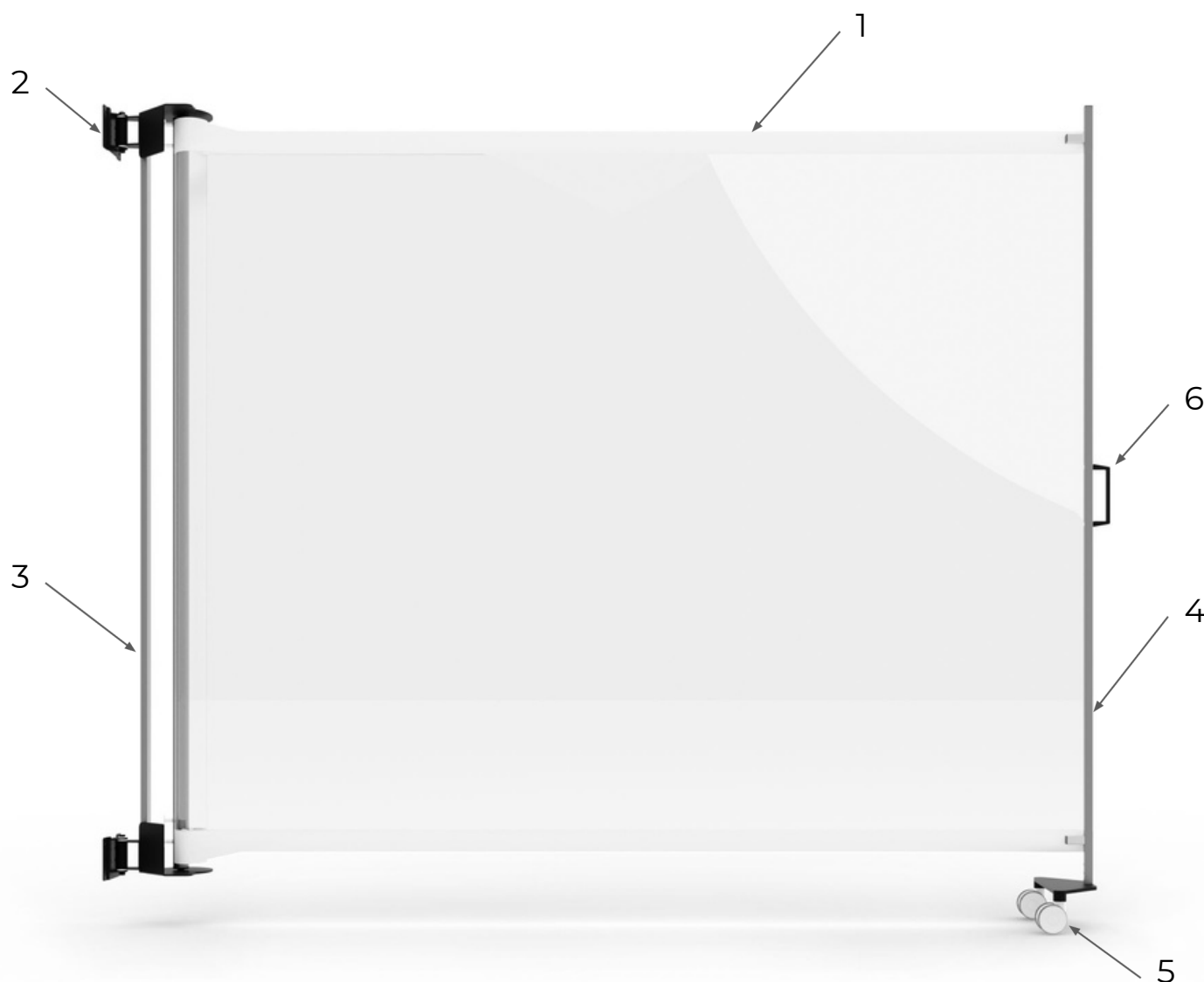

1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Nastavitelné držáky pro různé použití
3. Hliníkový hřbet
4. Ocelový rám s práškovým nástřikem
5. Kolečka pro lékařské účely
6. Rukojeť s jedním dotykovým bodem

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha 1
Tel.: 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz,
Web: www.cleanlife.cz


Copyright 2025 KwickScreen. Všechna práva vyhrazena.

CLEANLIFE
Inovace | Technologie | Čistota

Flexibilní zástěna AIR - možnosti držáků


Otočný držák s rychlouzávěrem

- Slouží k uvolnění kabelového otvoru
- Otočný a rychlouzávěr

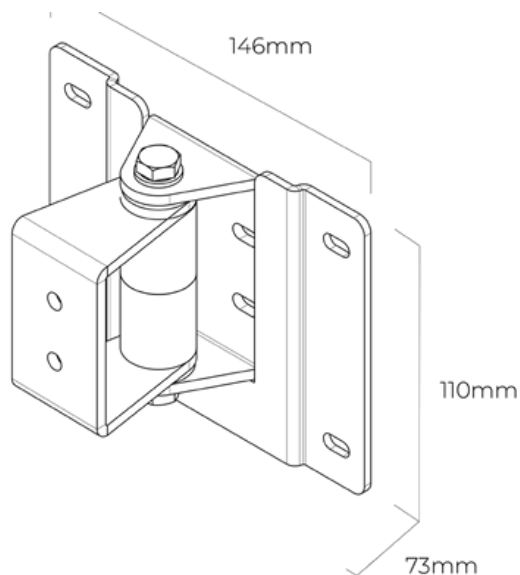


Otočný držák

- Menší rozměry
- Připevňuje se přímo na zed' (bez rychlouzávěru)

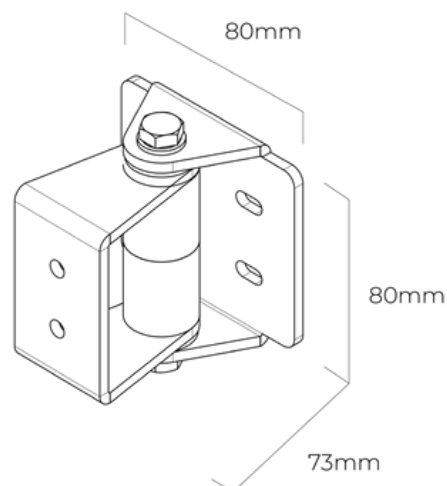


Montáž na stěnu

- Udržuje jednotku v jedné rovině se stěnou

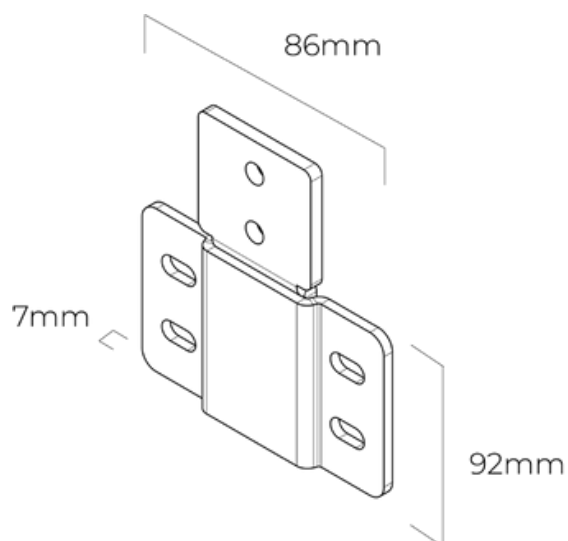

Statický výškově nastavitelný držák

- Udržuje jednotku ve vzdálenosti od stěny bez otočného čepu

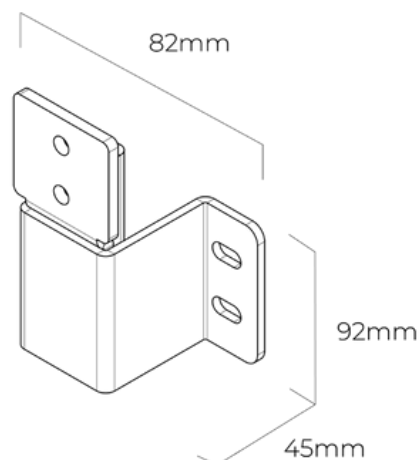

Čištění flexibilní zástěny AIR

Flexibilní zástěny jsou navrženy tak, aby splňovaly hygienické normy a pomáhaly předcházet šíření infekcí. Mají hladký povrch, který se snadno udržuje a zvládne časté čištění. Rám je z odolného eloxovaného hliníku, ostatní kovové části jsou chráněny práškovým lakem. Samotný panel je z PVC.



Vhodné dezinfekční přípravky

Pro zajištění dlouhé životnosti a optimální kvality flexibilních zástěn doporučujeme pravidelné používání následujících dezinfekčních přípravků:



Desprej® Sensitive
500 ml



Mikrocid®
Sensitive wipes
220 ks



Bacillol® 30
Sensitive Foam
750 ml



Bacillol® 30
Sensitive Tissues
80 ks



Tyto prostředky efektivně odstraňují nežádoucí mikroorganismy a zároveň pomáhají chránit materiály před poškozením - prodlužují jejich funkčnost a estetickou hodnotu.

Všechny vhodné přípravky máme v naší nabídce. Objednat můžete telefonicky, e-mailem, nebo u svého obchodního zástupce.

Hlubkové čištění

Důkladné (hlubkové) čištění se doporučuje provádět každé 3 až 4 měsíce. Při tomto čištění je potřeba zástěnu zcela roztáhnout a vyčistit i vnitřní části rámu.



PŘI ČIŠTĚNÍ FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNY NEPOUŽÍVEJTE:

- Vosky ani rozpouštědla.
- Přípravky s abrazivním (hrubým) povrchem, jako je ocelová vlna.
- Čisticí prostředky, které mohou vytvářet usazeniny nebo obsahují syntetické látky.
- Alkalické prostředky s pH vyšším než 10.
- Rozpouštědla (chemická).
- Benzín.
- Tuky nebo oleje.
- Drsné houbičky nebo čisticí prášky určené do kuchyně – zejména na potíštěný panel.
- Ostré předměty nebo žiletky k seškrabávání povrchu.

Zástěnu nečistěte na přímém slunci ani při vysokých teplotách.

Při čištění nepoužívejte zbytečně tlak, zástěnu stačí jen lehce setřít.

Po čištění nechte zástěnu otevřenou, dokud zcela neuschne.

Materiály a záruka

Rozpis materiálů:

Kompozitní	uPVC (bílý materiál) Polyester (čirý materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevnění
7%	11%	52%	16%	13%	1%

95 %+ tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu)

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy.

EU & UK: EN13501-1: 2018 - Euroclass B - s1 - d0

US: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny flexibilní zástěny mají dvouletou záruku výrobce na díly. Seznamy náhradních dílů jsou k dispozici u společnosti ProCleanLife.



Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, jako je například ohýbání panelu obrazovky způsobem, který není určen. Další informace získáte u místního prodejce nebo společnosti KwickScreen.

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha 1
Tel.: 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz,
Web: www.cleanlife.cz

Copyright 2025 KwickScreen. Všechna práva vyhrazena.