

CLEANLIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technický list **DUO**



www.cleanlife.cz

Flexibilní zástěna Duo - rozměry

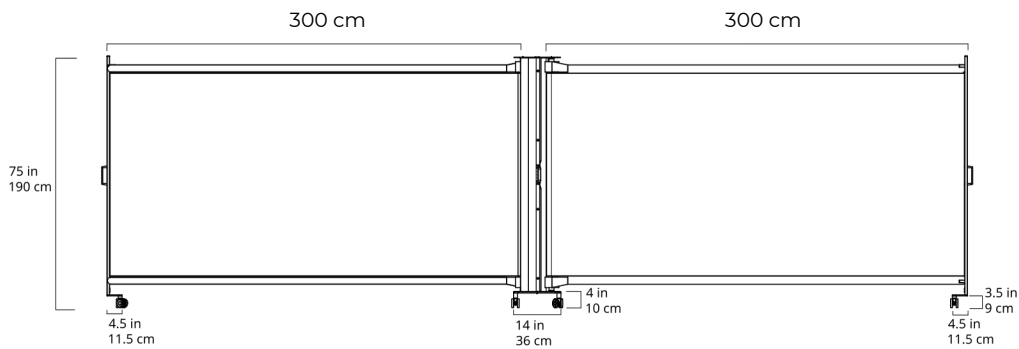

Rozměry balení:

Délka

190 cm
6' 2"

Hmotnost

21 kg
46 lb

Šířka

40 cm
16"


Vnitřní rozměry panelu

3 m x 1.5 m
10' x 5'

Hloubka

20 cm
8"

Flexibilní zástěna Pro - Podrobnosti o produktu

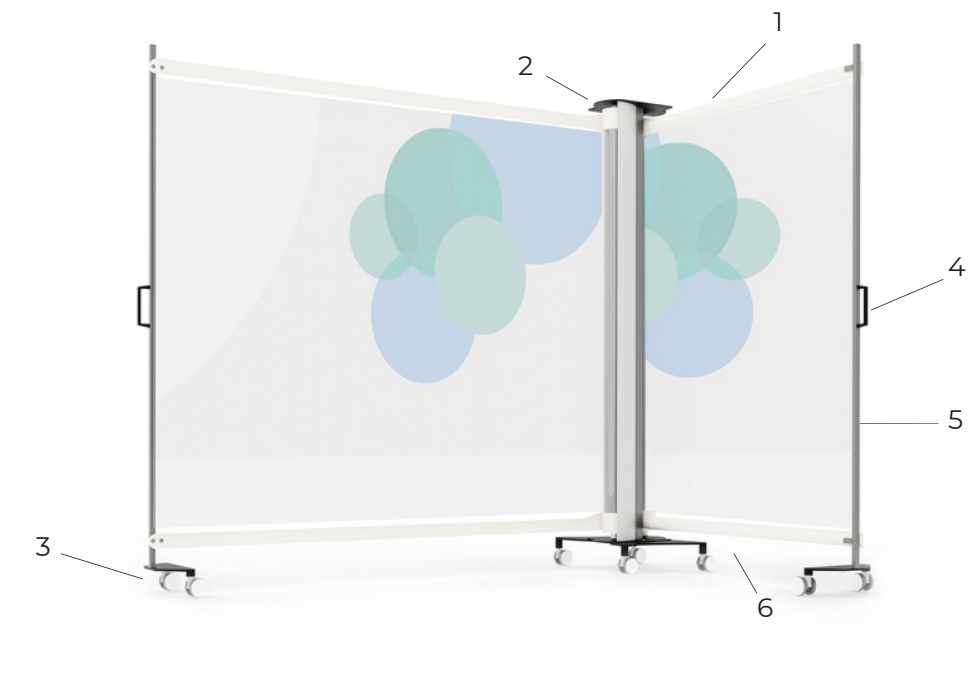

1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Ocelový rám s práškovým nástřikem
3. Kolečka pro lékařské účel
4. Rukojeť s jedním dotykovým bodem
5. Hliníkový páteř
6. 2x 3 metrové obrazovky

Čištění flexibilní zástěny DUO

Flexibilní zástěny jsou navrženy tak, aby splňovaly hygienické normy a pomáhaly předcházet šíření infekcí. Mají hladký povrch, který se snadno udržuje a zvládne časté čištění. Rám je z odolného eloxovaného hliníku, ostatní kovové části jsou chráněny práškovým lakem. Samotný panel je z PVC.



Vhodné dezinfekční přípravky

Pro zajištění dlouhé životnosti a optimální kvality flexibilních zástěn doporučujeme pravidelné používání následujících dezinfekčních přípravků:



Desprej@ Sensitive
500 ml



Mikrocid@
Sensitive wipes
220 ks



Bacillol@ 30
Sensitive Foam
750 ml



Bacillol@ 30
Sensitive Tissues
80 ks



Tyto prostředky efektivně odstraňují nežádoucí mikroorganismy a zároveň pomáhají chránit materiály před poškozením - prodlužují jejich funkčnost a estetickou hodnotu.

Všechny vhodné přípravky máme v naší nabídce. Objednat můžete telefonicky, e-mailem, nebo u svého obchodního zástupce.

Hlubkové čištění

Důkladné (hlubkové) čištění se doporučuje provádět každé 3 až 4 měsíce. Při tomto čištění je potřeba zástěnu zcela roztáhnout a vyčistit i vnitřní části rámu.



PŘI ČIŠTĚNÍ FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNY NEPOUŽÍVEJTE:

- Vosky ani rozpouštědla.
- Přípravky s abrazivním (hrubým) povrchem, jako je ocelová vlna.
- Čistící prostředky, které mohou vytvářet usazeniny nebo obsahují syntetické látky.
- Alkalické prostředky s pH vyšším než 10.
- Rozpouštědla (chemická).
- Benzín.
- Tuky nebo oleje.
- Drsné houbičky nebo čisticí prášky určené do kuchyně – zejména na potíštěný panel.
- Ostré předměty nebo žiletky k seškrabávání povrchu.

Zástěnu nečistěte na přímém slunci ani při vysokých teplotách.

Při čištění nepoužívejte zbytečně tlak, zástěnu stačí jen lehce setřít.

Po čištění nechte zástěnu otevřenou, dokud zcela neuschne.

Materiály a záruka

Rozpis materiálů:

	Ocel	Hliník	Polyester	Skleněné vlákno	uPVC	Další komponenty
Duo	50%	20%	16%	4%	4%	<1 % hmotnostních každého z nich

95 %+ tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu)

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy.

EU & UK: EN13501-1: 2018 - Euroclass B - s1 - d0

US: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny flexibilní zástěny mají dvouletou záruku výrobce na díly. Seznamy náhradních dílů jsou k dispozici u společnosti ProCleanLife.



Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, jako je například ohýbání panelu obrazovky způsobem, který není určen. Další informace získáte u místního prodejce nebo společnosti KwickScreen.

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha 1
Tel.: 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz,
Web: www.cleanlife.cz

Copyright 2025 KwickScreen. Všechna práva vyhrazena.